

4DryField® PH

O primeiro e único produto com certificação CE para Hemóstase e Prevenção de Aderências



Fácil.Seguro.Eficaz. Sem componentes animais ou humanas.

Um produto - dois modos de aplicação

- Altamente eficaz na prevenção de aderências com 4Dryfield® gel ^{2,3,4}
- Hemóstase imediata com 4Dryfield® em pó ^{2,3}
- Pó de amido absorvível
- Excelente biocompatibilidade¹
- Não promove o crescimento de células cancerígenas¹
- Absorvido em poucos dias ¹



2 em 1

4DryField® PH

PROVIDES HEMOSTASIS – PREVENTS ADHESIONS

Um produto - dois modos de aplicação

Hemóstase com 4DryField® em pó

1. Aplicar



Aplicar 4Dryfield® em pó directamente no ponto hemorrágico

2. Pressionar (2-4 min)*



Estabilizar fazendo pressão com uma gaze (húmida) até completar a hemóstase

3. Irrigar



Irrigar a gaze. Para evitar que o coágulo se desfaça.

*Negligenciável em hemorragias difusas e em toalha

Prevenção de Aderências com 4DryField® em Gel

1. Aplicar



Distribuir uniformemente uma camada fina de 4Dryfield® sobre a superfície da ferida

2. Transforme em gel



Salpicar com soro 0,9% até o pó se transformar num gel

Dosagem-Gel



Para 5gr de 4Dryfield® usar cerca de 20-40ml de soro



Distribuído em Portugal por: **HR** hospitalar

