

PINÇA TIRA AGRAFOS 11.000.00.036

GAMA: Cirurgia

APLICAÇÃO: Pinça para remoção de agrafos.

DESCRIÇÃO

Instrumento para a remoção de todos os agrafos da pele depois da utilização dos mesmos para fechar a ferida.

COMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO

O dispositivo é composto por dois materiais: ABS e PC.




PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Após o cabo ter sido empurrado pela força exterior, o cortador superior do tira-agrafos faz força contra a parte média do agrafado que se situa no cortador inferior do dispositivo. Sob a transmissão mecânica de cada parte, duas das extremidades do agrafador devem ficar viradas para cima e para fora da superfície cutânea, conseguindo-se assim o objectivo de remover os agrafos.

ÍNDICE DE CAPACIDADE

- As peças em metal do tira-agrafos cutâneos possuem a função anti-erosão.
- O tira-agrafos cutâneos é esterilizado com óxido de etileno.

COMO UTILIZAR

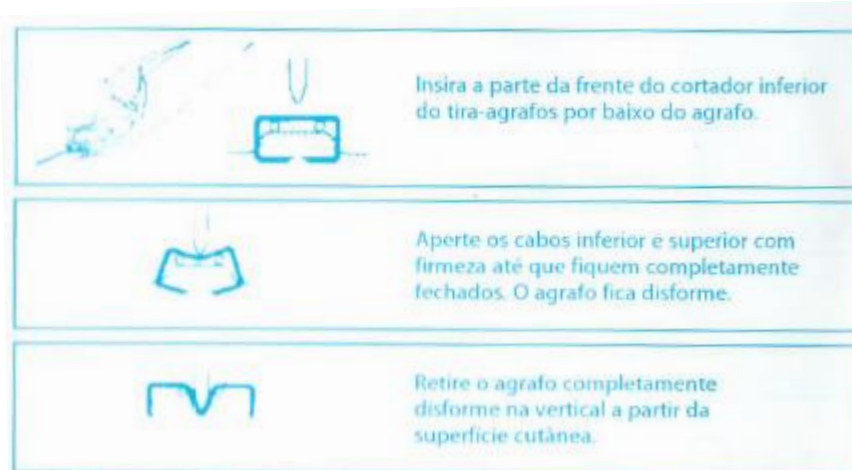

ADVERTÊNCIAS

- O tira-agrafos deve ser operado por um profissional com formação médica.
- O tira-agrafos é esterilizado com óxido de etileno.
- O tira-agrafos não deve ser contaminado quando é retirado da embalagem. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Utilize o tira-agrafos cutâneos no prazo de validade.

ESTERILIZAÇÃO

Modo de esterilização: **óxido de etileno**

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ACONDICIONAMENTO e TRANSPORTE

O produto deve ser conservado em ambientes com humidade relativa <80% sem gases erosivos e com boa ventilação. Não acondicionar sob outras cargas e manusear com cuidado.

ELIMINAÇÃO

Descartar em contentor adequado de lixo para incineração.

EMBALAGEM

Embalagem individual (1 unidade): 1 face de papel e 1 face transparente

Embalagem secundária (20 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe Is, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV, nº 0123

ID atribuído pelo INFARMED: 398183

Código NPDM: H02010106 – *Extratores de pontos metálicos de uso único*

Código CDM: 16699360

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone