

PROTETOR MAMÁRIO 34.000.00.020

GAMA: Cuidados Gerais

APLICAÇÃO: Para proteção do mamilo durante a amamentação



DESCRIÇÃO

Os protetores de mamilo de silicone foram desenvolvidos para auxiliar as mães em períodos difíceis de lactação. A sua utilização durante a amamentação pode aliviar a ocorrência de dor e inflamação.

Ajustam-se a qualquer forma de mama e podem compensar mamilos planos ou invertidos. Dispositivo inodoro e sem sabor.



COMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO

Silicone de grau médico

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Lavar as mãos
2. Pegar num protetor mamário limpo, humedecer e dobrar a borda do protetor para a parte em forma de mamilo (conforme figura I)
3. Colocar o mais junto possível do seu mamilo
4. De seguida, juntar a borda do protetor à mama e segurar firmemente, apoiando ao mesmo tempo, a mama com os dedos.

Quando o bebé iniciar o processo de sucção, o protetor do mamilo manter-se-á na mama por um processo de vácuo (conforme figura II)

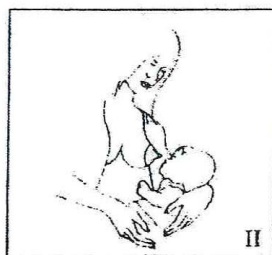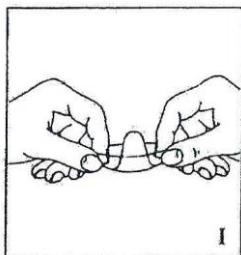

CONSELHOS DE AMAMENTAÇÃO

É indicado colocar o máximo possível do protetor na boca do bebé. Após amamentar deve expor a sua mama ao ar.

Durante a primeira e segunda semana deve alimentar frequentemente o bebé (por exemplo: a cada duas ou três horas) para a mama não dilatar e não causar mais dor no mamilo ou dificuldade na sucção do bebé.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

É aconselhável limpar os protetores mamários antes e depois de cada utilização. Devido às características especiais do silicone, todos os métodos de limpeza e esterilização são aceitáveis, por exemplo: colocar os protetores numa solução para esterilização, ferver os protetores em água, etc. Estes processos podem ser repetidos sem que a qualidade ou textura dos protetores mamários seja afetada.

Armazenar num recipiente limpo, sem humidade e fechado.

VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem primária (Unidade Mínima de Venda - 100 unidades): Bolsa de Plástico – PE

Embalagem secundária: Caixa de Cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril de múltiplo uso

Classe I, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 457843

Código NPDM: Z12080399 - *Instrumentos vários de suporte ao parto e para assistência materna - outros*

Código CDM: 74231782

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone