

## Saco de Urina Pediátrico

76.380.42.000

**GAMA:** Ginecologia/Urologia**APLICAÇÃO:** Dispositivo destinado à recolha de urina

### DESCRIÇÃO

Saco de urina para pediatria sem torneira de esvaziamento, com graduação entre os 10 e os 100ml. Possui um adesivo para permitir a adesão do dispositivo à pele do paciente.

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Saco: PE

Folha de revestimento do adesivo: papel

Adesivo: Acryl

### ESTERILIZAÇÃO

Dispositivo fornecido sob a forma não esterilizada.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Remover o papel de proteção da zona do adesivo.
2. Nas crianças do sexo feminino a abertura do saco é colocada na parte superior dos órgãos genitais. Nas crianças do sexo masculino é necessária a colocação do pénis na abertura do saco de urina.
3. Depois da recolha da urina, remover o saco e colar os dois lados opostos do adesivo para fechar o saco. O saco não deve ser usado para recolha de urina de 24 horas.

### VALIDADE

Data de validade: 5 anos.

### ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

### EMBALAGEM

Embalagem individual (1 unidade): saco de PE

Embalagem secundária (100 unidades – unidade mínima de venda): caixa de cartão

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico de uso único

Classe I não estéril, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 334474

Código NPDM: A06030301 - *Sacos de urina (Cod. classificação ISO 09.27)*

Código CDM: 14263270

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone