

VIDEO LARINGOSCÓPIO LED

91.000.01.002

GAMA: Intubações**APLICAÇÃO:** Intubações**DESCRIÇÃO**

Vídeo Laringoscópio para lâminas de uso único. Equipado com um monitor de 3,5" Full View HR com LCD de 2 megapixels.

O dispositivo apresenta uma bateria recarregável de íons de lítio.

Fornecer uma imagem nítida e detalhada para fácil entubação. O

dispositivo pode guardar imagens e gravação de vídeo. Os dados podem ser transferidos através de um cabo USB.

- Fonte de luz: LED a cores
- Bateria de lítio 3,7 V – 120 min de duração
- Resolução: 2.0 M Pixel
- Peso: 313 gr
- Cartão memória SD 4 GB
- Com gravação de imagem e video passagem via USB
- Usado com lâminas descartáveis de policarbonato (tamanhos 1, 2, 3 e 4 e MAC DX3)

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO**

Componentes principais: ABS, aço inoxidável

ESTERILIZAÇÃO

Produto não esterilizado.

ACONDICIONAMENTOCondições de operação:

- +5° a +40°C de temperatura ambiente
- Humidade relativa do ar: 10 - 95%

Condições de armazenamento e transporte:

- -20° a +60°C de temperatura ambiente
- Humidade relativa do ar: 10 - 95%

LIMPEZA

O Videolaringoscópio deve ser desinfetado antes da primeira colocação em funcionamento.

O visor não é impermeável. Por conseguinte, não pode ser submerso em líquidos. Todo o dispositivo, incluindo visor e botões de controlo, pode ser desinfetado com toalhetes desinfetantes antibacterianos adequados.

O Videolaringoscópio deve ser ainda desinfetado após cada utilização, cumprindo as diretrizes locais.

GARANTIA

Em condições normais de operação, a Dahlhausen presta uma garantia de 12 meses a contar da data de compra, que cobre defeitos de fabrico do Videolaringoscópio. Para devolução, o Videolaringoscópio terá de estar comprovadamente desinfetado.

A garantia inclui: troca de todas as peças.

Não incluído na garantia: despesas de transporte, danos causados por utilização indevida ou abusiva, acidente, negligência e baterias.

EMBALAGEM

Embalagem individual (1 unidade): PE, Papel

Embalagem secundária – unidades mínima de venda (1 unidade): Cartão corrugado

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Código NPDM: Z12021004 - Videolaringoscópios

ID atribuído pelo INFARMED: 137115

Código CDM:

REF	Código CDM
91.000.01.002	24106666

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone