

MANÁPULA PARA HIGIENE CORPORAL ANTIBACTERIANA, ANTIFÚNGICA E ANTIVÍRICA

KAF G71/KAF G71-1/KAF G71-2

GAMA: Desinfecção

APLICAÇÃO: Higiene e Desinfecção Corporal

DESCRIÇÃO

Manápula para Higiene e Desinfecção Corporal de pacientes hospitalizados e com mobilidade reduzida. Sem álcool, látex, lanolina ou Parabenos. Nutre e hidrata a pele graças à Vitamina E e Vitamina B. pH de 5.5.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Digluconato de Clorohexidina 20% Concentrado, Glicerol, Cocoamidopropil Betaína, Benzoato de Sódio, Sorbato de Potássio, Polissorbato 20, PEG-7, D-Pantenol, Tocoferol, Perfume, Água.

Substâncias ativas

2% de Digluconato de Clorohexidina 20% Concentrado
(corresponde a 0,40% de CHG – Gluconato de Clorexidina)




INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar na área do corpo desejada, utilizando uma manápula diferente para cada região do corpo. Sem necessidade de enxaguar ou secagem extra após utilização.

Adequado para aquecimento (em estufas ou micro-ondas):

1. Colocar a embalagem no micro-ondas;
2. Aquecer durante 20 segundos a 700 W;
3. Verificar a temperatura dos toalhetes;
4. Não utilizar acima de 35-45°C.

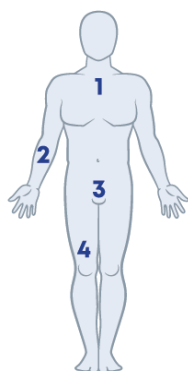

Legenda:

- 1- Peito e Ombros
- 2- Braços
- 3 - Área perineal
- 4 - Pernas
- 5 - Região posterior do pescoço
- 6 – Costas
- 7 – Área posterior do Quadril
- 8 - Pés

PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Produto Bactericida, Fungicida e Viricida, testado de acordo com as normas EN 13624, EN 13727 e EN 14476.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar os olhos com água em abundância durante alguns minutos. Se ocorrer irritação ocular, consultar um médico.

Manter fora do alcance de crianças.

Apenas para uso externo.

VALIDADE

Em condições normais, o prazo de validade é de 2 anos a partir da data de fabrico.

Após abertura, utilizar o produto dentro de 3 meses.

ACONDICIONAMENTO

Armazenar em local fresco e seco.

Manter o produto afastado de temperaturas elevadas, luz solar direta e chama aberta.

Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso.

ELIMINAÇÃO

Descartar os resíduos e embalagens usadas em conformidade com a regulamentação nacional em vigor.

EMBALAGEM

Referência	Quantidade
KAF G71	8 Unidades
KAF G71-1	10 Unidades
KAF G71-2	12 Unidades

Dimensão da Manápula: 17x22cm

Peso de uma manápula seca: 3,74 gr ± % 10

Peso de uma manápula impregnada: 14,96 gr ± % 10

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Produto Biocida Tipo 1 - Produtos utilizados na higiene humana, aplicados na pele ou no couro cabeludo humanos ou em contacto com eles com o objetivo primeiro de desinfetar a pele ou o couro cabeludo.

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SAN: Acrylonitrile styrene; SI: Silicone; SB: Styrene butadiene; TPU: Thermoplastic polyurethane. REACH: Regulação europeia acerca do registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas. A comunicação de informação acerca das substâncias visadas é obrigatória se for superior a 0.1% massa/massa.