



## Cureta dérmica



Ref: MK402 – ø 2mm  
MK403 – ø 3mm  
MK404 – ø 4mm  
MK405 – ø 5mm  
MK407 – ø 7mm

Embalagem: 20 unid.

### Uso previsto:

Instrumento descartável esterilizado para realização de curetagens exactas e delicadas:

A curetagem é uma técnica que se destina à remoção de alterações superficiais da pele danificando o mínimo possível os tecidos circundantes.

A cureta é extremamente afiada, proporcionando portanto uma remoção do tecido exacta e delicada, o que também facilita a sua aplicação no tratamento de tumores malignos superficiais.

### Vantagens:

A cureta dérmica é semelhante a uma caneta de tinta permanente em termos de tamanho e peso e o manuseamento é incrivelmente prático. As suas características são: Lâmina circular extremamente afiada; Pega ergonómica em plástico; Boa visibilidade do campo operatório.

### Instruções de utilização:

Antes de efectuar a curetagem normalmente é necessário aplicar uma anestesia local e desinfetar a pele. Em casos de lesões muito pequenas e superficiais, é possível evitar recorrer à anestesia.



1.O método mais comum é a chamada "técnica da caneta de tinta permanente". Para fazer, segurase a cureta entre o polegar, o dedo indicador e o dedo médio enquanto se estica a pele com os dedos da outra mão.

2.Este método para segurar o instrumento permite guiá-lo com precisão, para que o pedaço de tecido possa ser removido com uma só incisão.

3.Um outro método frequentemente utilizado é a "técnica do descascador de batatas", com a pega da cureta presa na dobra dos dedos e apoiada pelos outros dedos da mão que está a realizar a curetagem. Os polegares proporcionam uma base estável. Esta técnica permite guiar o instrumento, exercendo uma maior pressão, mas a sua exactidão é ligeiramente menor. Esta técnica só é preferencial em casos de pele dura, porque a agudeza do corte é superior.

### Avisos/precauções para uma preparação e um manuseamento seguros:

- Leia e cumpra as instruções de utilização;
- Utilize o produto apenas em conformidade com as indicações de uso previsto, ver Uso previsto;
- Guarde todos os produtos novos num local seco, limpo e seguro;
- Evite altas temperaturas, níveis de humidade elevados, luz solar directa, imersão e guarde à temperatura ambiente;
- Não guarde em locais destinados ao armazenamento de produtos químicos nem em locais onde haja ocorrência de gases;
- Guarde dentro da embalagem fechada intacta e sem perfurações;
- É necessário confirmar o período de validade em cada embalagem e caixa (duração em armazém: 5 anos);
- Quando estiver a verificar o período de validade de cada embalagem e caixa, elimine todos os produtos cujo prazo tenha expirado;
- Antes de cada utilização, inspeccione o produto e verifique se este: está solto, dobrado, partido, rachado, desgastado ou contém componentes fracturados.
- Não utilize o produto se este apresentar quaisquer danos ou defeitos. Descarte o produto se este apresentar danos.
- Evite o contacto das extremidades das lâminas delicadas com superfícies rígidas ou outros instrumentos

### Contra-indicações – Proibição:

- Proibido reutilizar;
- Proibido reesterilizar;
- Não utilizar depois de expirado o prazo de validade;
- Não utilizar se houver suspeita de que o estado asséptico do produto tenha sido comprometido;
- por violação da embalagem.



Reacções adversas ou efeitos secundários:

Nenhuns.



kai Europe GmbH  
Löhndorfer Str. 51, D-42699 Solingen, Germany

SYMBOLS:

	ETO sterilization
	Disposable
	Shelf life

CE 0197