


MATERIAL DE FUNDO ESTÉRIL PARA VISIBILIDADE

GAMA: Dispositivos descartáveis para microcirurgia

APLICAÇÃO: Para utilização em Anastomose Microcirúrgica de Micro Vasos, sob visualização de um microscópio para permitir ao cirurgião visualizar os detalhes dos vasos sujeitos a anastomose.

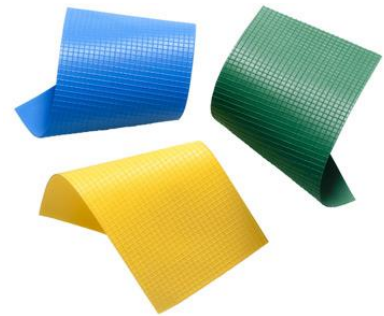

SEM LÁTEX

DESCRIÇÃO

O material de visibilidade pode ser utilizado com o lado da grelha (quadrícula com 1mm de lado) voltado para cima ou com o lado liso oposto voltado para cima.

O material possui uma superfície não refletora, o que elimina fatores de distração causados por iluminação secundária, e tem um acabamento não aderente para auxiliar na mobilização dos vasos.

O material de silicone selecionado é adequado para colocação temporária no interior do organismo. Uma mistura de bário é utilizada para tornar o material opaco aos raios-X.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência	Cor	Dimensões
VB-2	Amarelo	50mm x 25mm
VB-3	Verde	
VB-4	Azul	



PRECAUÇÕES

- O material NÃO CONTÉM LÁTEX.
- Só deve ser usado para a finalidade a que se destina.
- Não utilizar para implantação - deve ser removido do campo cirúrgico antes do encerramento da incisão cirúrgica.
- Não deve ser utilizado por mais de 60 minutos continuamente.
- Este dispositivo é fornecido estéril, destinado APENAS a uma utilização.
- Não deve ser reesterilizado depois de aberto.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.
- Eliminar imediatamente se a embalagem não estiver selada.
- A reutilização de dispositivos de uso único representa um risco de infeção para o doente.

ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO

O material de fundo para visibilidade é fornecido esterilizado para utilização única. Embalado individualmente numa caixa com 12 unidades, esterilizado por Radiação Gama em conformidade com a norma EN 11137.

ELIMINAÇÃO

Pode ser eliminado sem quaisquer instruções especiais e não representa perigo se forem cumpridos os regulamentos de eliminação de resíduos médicos.

EMBALAGEM

Embalagem primária (1 unidade): manga de esterilização

Embalagem secundária (12 unidades – unidade mínima de venda): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: SGS United Kingdom Limited, nº 0120

ID Dispositivo: 479450

Código NPDM: C0199 - Dispositivos para sistema arterio-venoso – outros

Código CDM: a aguardar codificação pela Autoridade Competente



Imagem ilustrativa da embalagem secundária do produto